

692

Faltbare Rampen

Das Transportieren eines Scooters oder Elektrorollstuhls im Auto wird dank der Rampen einfach. Diese faltbaren Rampen stellen sicher, dass Sie schwere Scooter und Elektrorollstühle sicher ins Auto einladen können.




**Einschließlich Aufbewahrungstasche.
Ein Set beinhaltet zwei Rampen.**



Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Informationen 692

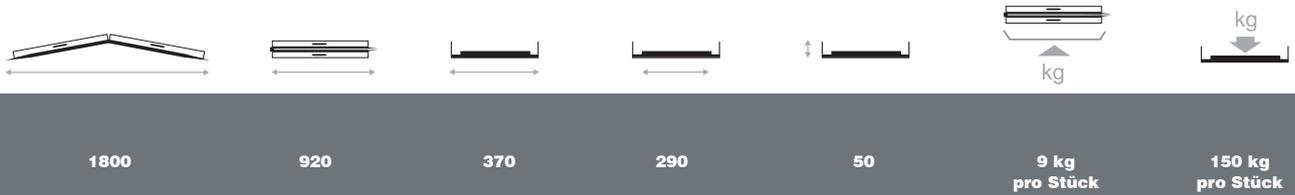

Abweichungen bei Maßen und Gewichten (1,5 cm und 1,5 kg) sind möglich.

01 Griffe zum einfachen Transport der Rampen

02 Rutschfeste Oberfläche für eine bessere Traktion des Scooters oder Elektrorollstuhls

Maximale Belastbarkeit **03**
150 kg pro Rampe

Gebrauch der Rampen

Die Rampen sind ganz einfach zu benutzen

1. Aufklappen der Rampe.
2. Legen Sie die rutschfeste Auflage auf die zu überwindende Oberfläche.
3. Stellen Sie sicher, dass die Rampen stabil liegen.
4. Fahren Sie mit dem leeren Scooter oder Elektrorollstuhl die Rampen hinauf.

04 Mit rutschfester Auflage für besseren Halt der Rampen



Vermeiren Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Deutschland

Tel.: +49 (0) 211 94 27 90
Fax: +49 (0) 211 65 36 00

Mail: info@vermeiren.de
Site: www.vermeiren.de



VERMEIREN

Ihre Mobilität ist unser Anliegen



Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.



Technische Änderungen vorbehalten.